

程式安裝說明書

Eyeplayer 森思眼控滑鼠、1246 系列 – 認知學習 / 醫病溝通、SenseTalk 眼動 AAC 溝通、Eyejoy 眼動肌肉復健遊戲程式安裝說明。

目 錄

一． 認識森思	01
二． 程式安裝說明	02
01. 下載安裝程式	05
02. 執行安裝程式	07
03. 開 通 序 號	08


森思

用科技讓生命發光

為受到身體限制的障礙者，提供更完善的支援，透過眼動科技，學習控制雙眼移動，傳達他們的心聲，拉近人與人的距離，打破限制，釋放自由。

本公司軟體會以電子信件（或專人聯繫），提供包含硬體驅動程式／軟體安裝程式／軟體使用手冊／本安裝說明書之連結，請下載連結中的檔案以利軟體安裝及使用。

安裝程式共三大步驟，請依安裝說明逐步進行。

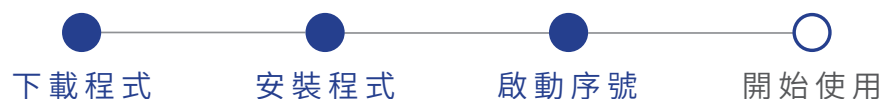

Eyeplayer 森思眼控滑鼠、1246 系列 – 認知學習／醫病溝通、SenseTalk 眼動 AAC 溝通、Eyejoy 眼動肌肉復健遊戲程式安裝說明。

各軟體使用說明請詳閱使用手冊。安裝手冊應與產品使用手冊於銷售時提供，或可上官網客服索取

www.senseet.com



程式安裝說明




眼控軟體安裝步驟相同，請依安裝需求選擇程式檔案。


01.

下載安裝程式

Step.1 點擊安裝連結準備下載安裝程式，點擊連結後網頁開起檔案所在如下所示，請點擊該檔案。

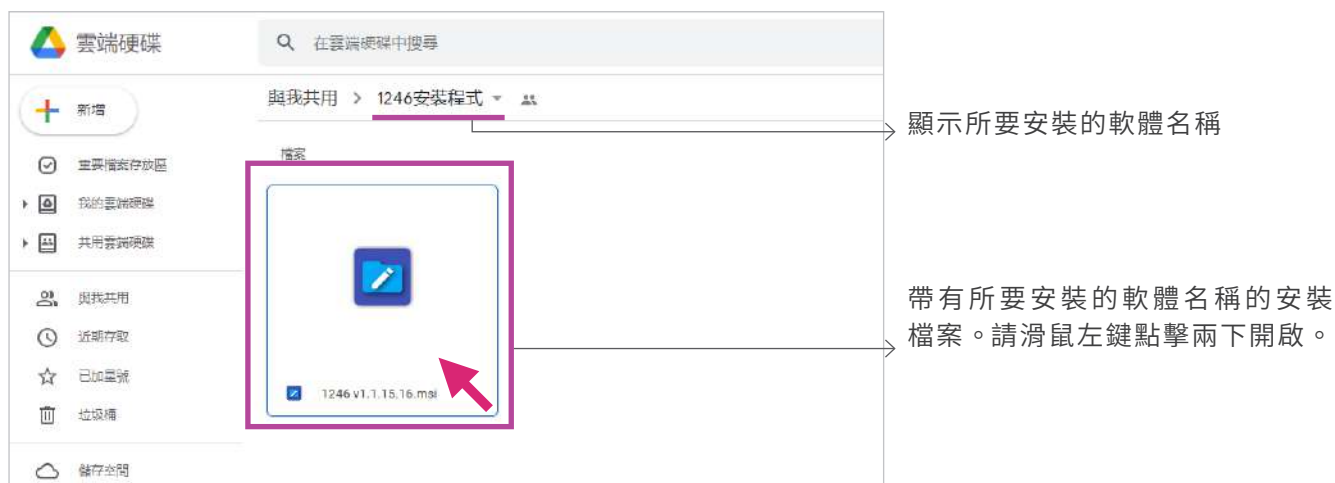


Step.2 點擊程式安裝檔案後，會看到【無法預覽】的通知，請點擊【下載】按鈕。

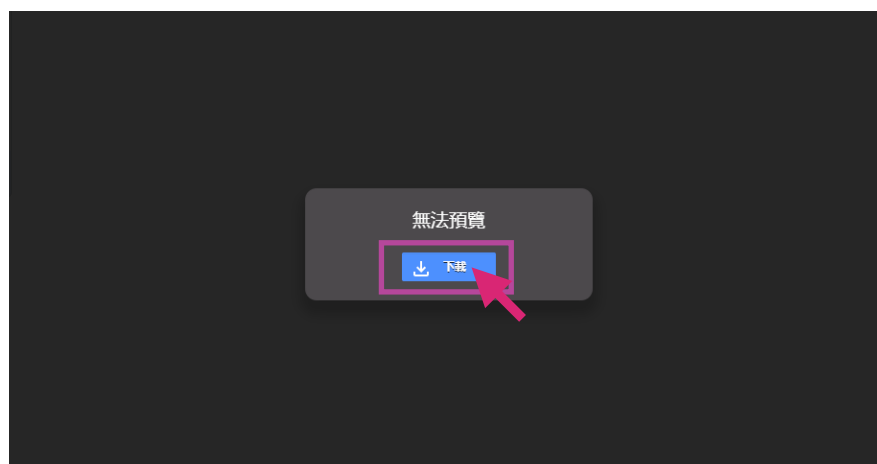




Step.3 選擇下載後，如看到【無法掃描檔案是否含有病毒】的通知，請安心點擊【仍要下載】按鈕。

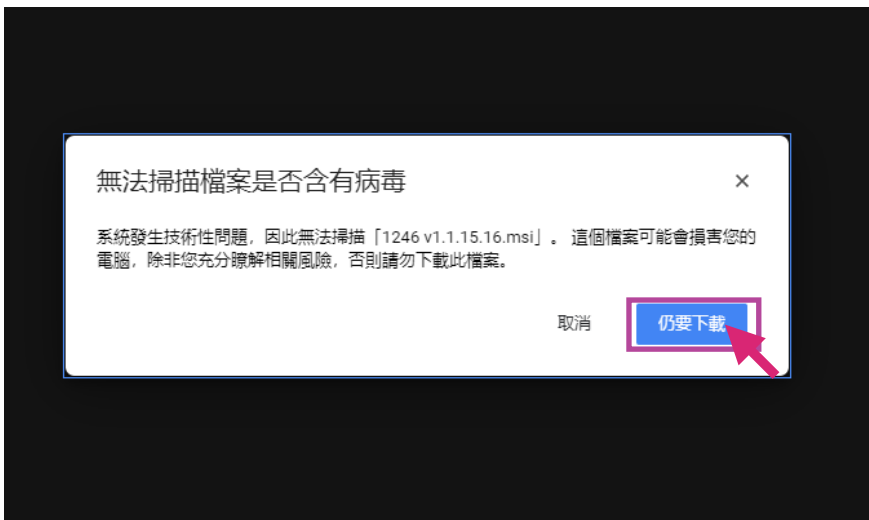

Step.4 點擊【仍要下載】後，螢幕會跳出儲存檔案的視窗，選擇儲存的，如桌面或是任何資料夾中，按【存檔】完成下載。

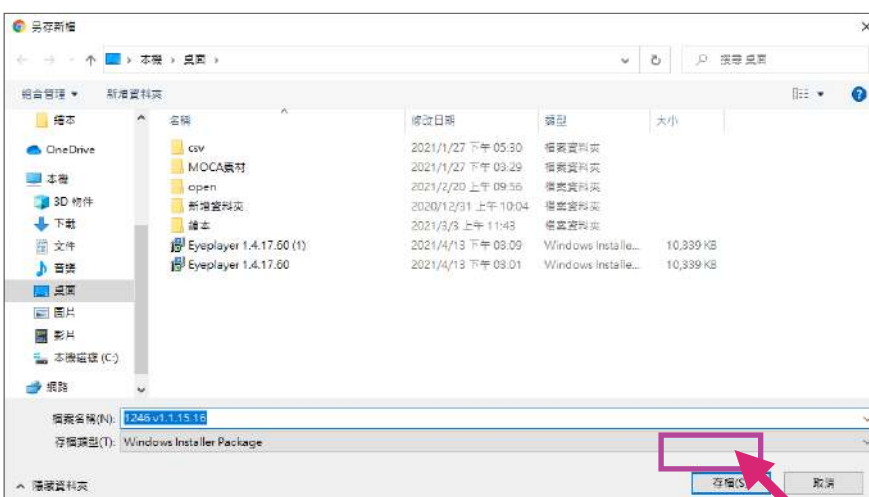


建議選擇桌面作為儲存地點，方便後續管理檔案。




02.

執行安裝程式

Step.1 接續前面流程，可在螢幕網頁下方看見下載完成的檔案，點擊開啟檔案，即會執行安裝流程。

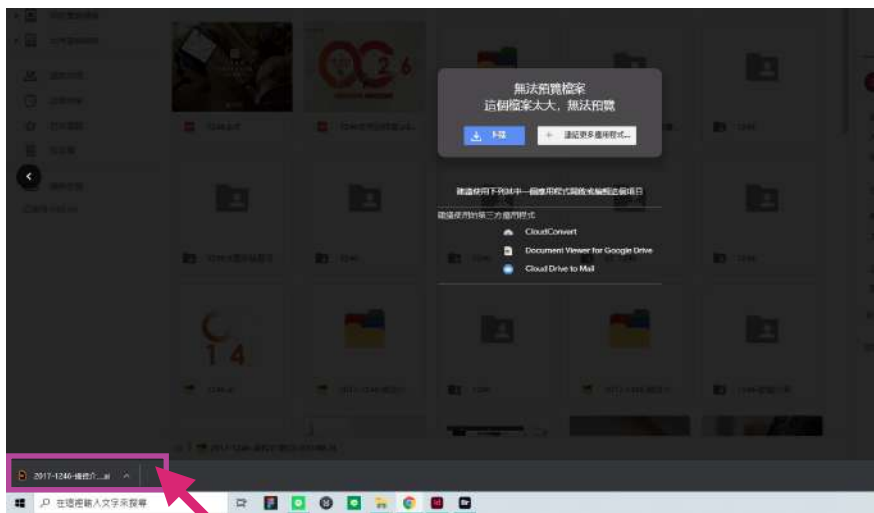


或開啟安裝檔案儲存的資料夾，點擊安裝檔執行安裝流程。

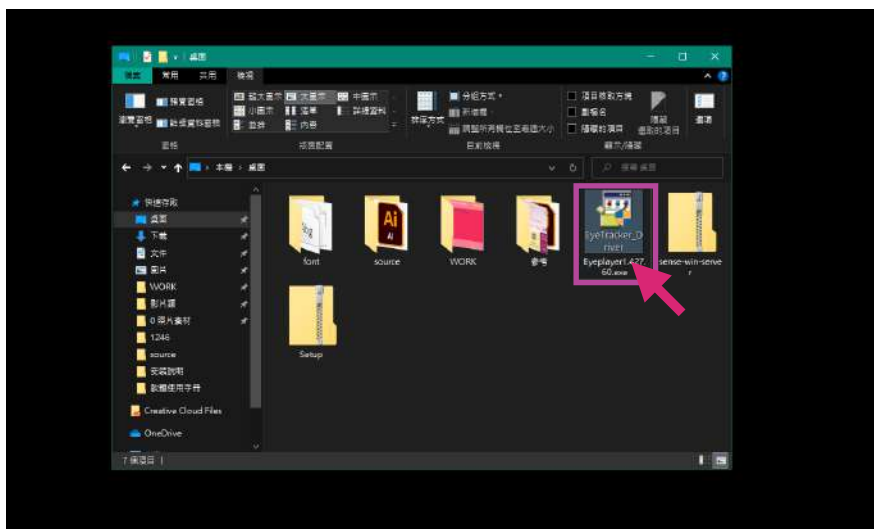



Step.2 螢幕跳出安裝精靈畫面，接著點擊【下一步】。

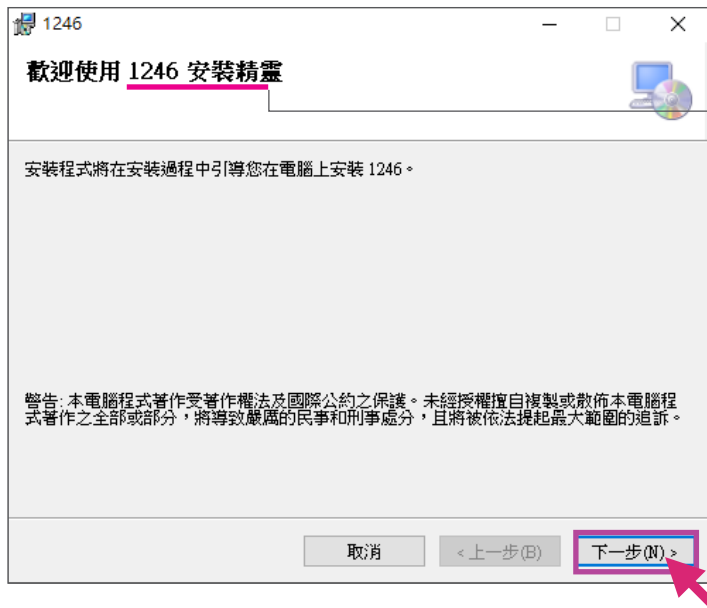


安裝精靈視窗會顯示所要安裝的軟體名稱。

Step.3 選擇安裝的資料夾，可以直接點選【下一步】。






Step.4 確認安裝，點選【下一步】開始安裝程式。

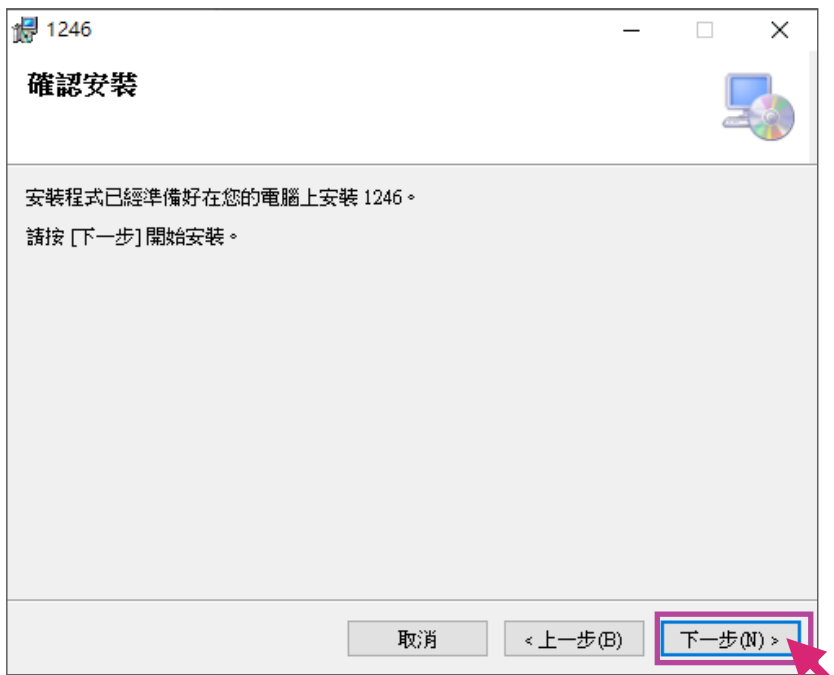


稍待待程式安裝至顯示【安裝完成】，點選關閉。

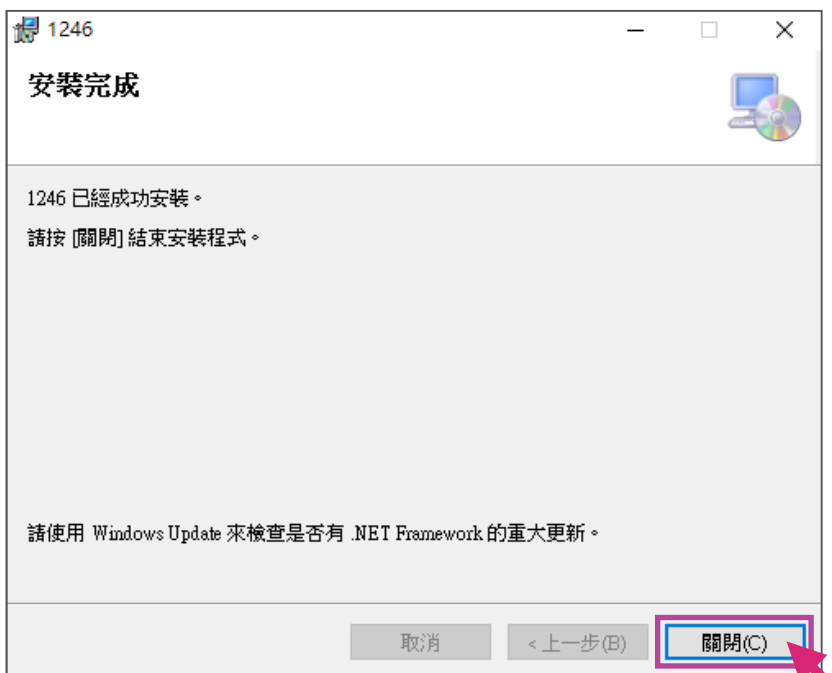




03. 啟動產品序號

Step.1 回到桌面，點擊所安裝的應用程式圖示。

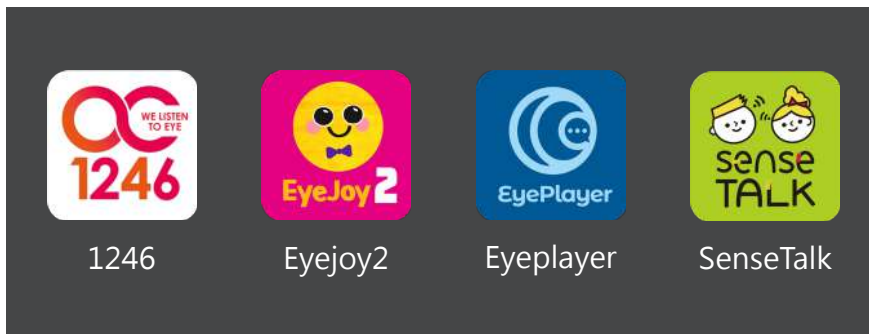

Step.2 進行產品啟動流程，按【確認】進行下一步。

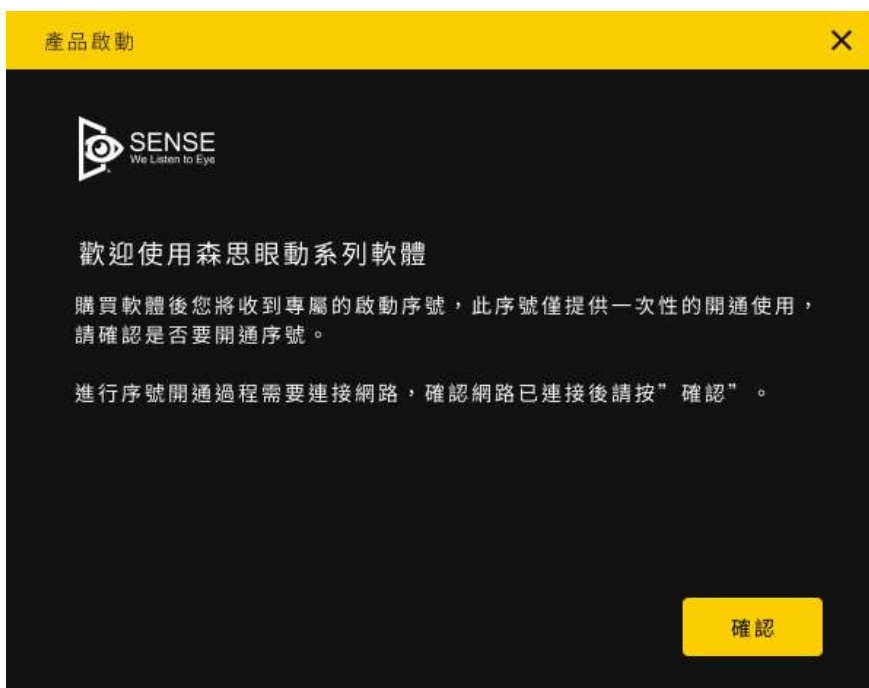

請準備好產品序號（本公司會以電子信件／或專人提供）。



Step.3 按【確認】若出現警示視窗，請檢視電腦網路連線狀態，產品啟動過程需要連線網際網路。確認網路已連接後請按【再試一次】。




Step.4 在輸入框中輸入您的產品序號，按【確認】。



★ 注意！
每組產品序號僅可開通一次，若需重新安裝請聯繫本公司專員。



Step.5 序號開通，請點擊【完成】開啟軟體完成安裝程序。

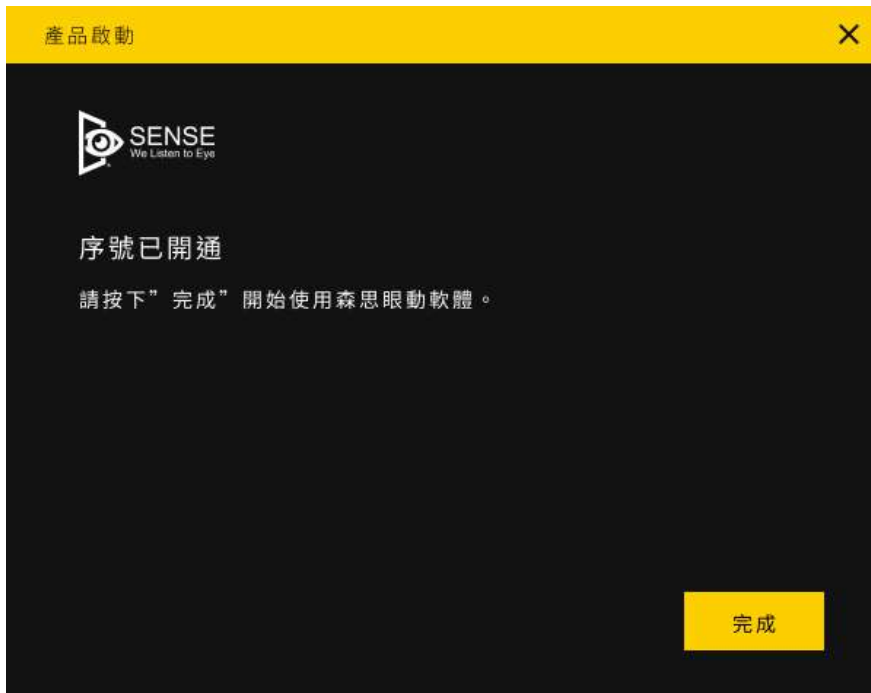


開通錯誤

出現下方警示，請依照指示聯繫本公司線上服務支援，了解問題。



出現紅字訊息請檢查輸入數字有無錯誤。

開始使用森思眼動產品。

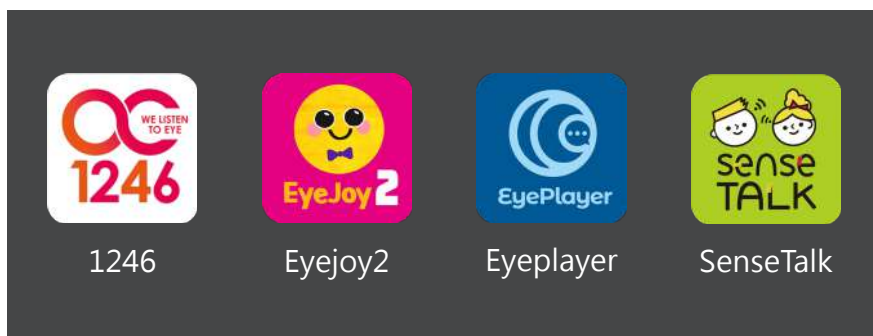

各軟體使用說明請詳閱使用手冊或上官網查看服務支援。



森思眼動官網
www.senseet.com



森思眼動
SENSE INNOVATION

Tel +886 2 87861196

Fax +886 2 87865817

100 台北市中正區博愛路 224 巷 5 號 2 樓之 1

service@senseet.com